



RECFRANCE
Innovier pour libérer

NOTICE D'UTILISATION

SUPPORT SIÈGE



KIWI




SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016



SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.5-8
Adjonctions	p.9
Entretien / stockage /mise au rebut	p.10
Garantie	p.10
Identification	p.10
Mentions légales	p.11

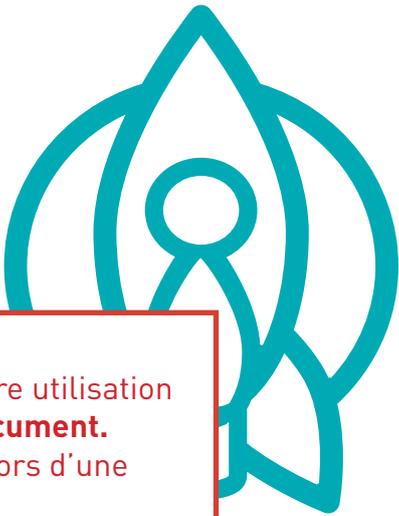

Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.** La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Kiwi est un support siège permettant d'accueillir une coque moulée. Ce système monté sur 3 (ou 4) roues tout-terrain permet à l'aidant un confort de conduite indispensable pour la sécurité du patient. La version 3 roues permet une excellente maniabilité, tandis que la version 4 roues assure une très bonne stabilité. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Le Kiwi est prévu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Kiwi doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, sur des terrains non accidentés. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Le châssis est muni de freins de parking sur ses roues arrières; penser à les actionner avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante support de siège disponible en **2** versions et plusieurs coloris.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Version	Largeur	Longueur	Hauteur du plateau	Poids max. utilisateur
Kiwi 3 roues	580mm	750mm	460 à 580mm	30kg
Kiwi 4 roues	580mm	680mm	460 à 580mm	60kg

Les châssis Kiwi peuvent accueillir des plateaux dont la largeur varie de 330 à 440mm, l'épaisseur de 12 à 25mm, et la profondeur jusqu'à 400mm.



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

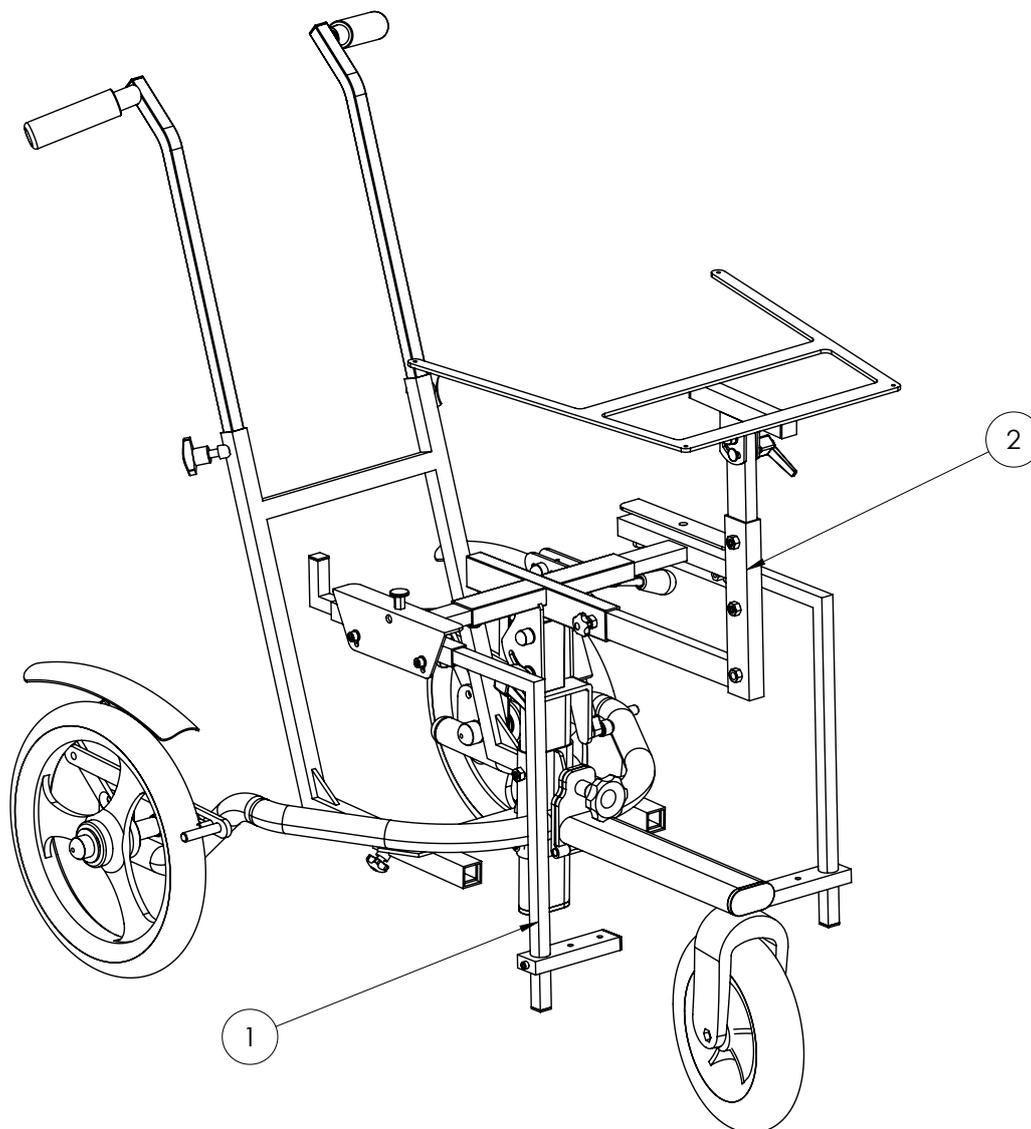

N° article	Référence	Description	Qté
1	KIW 03	Ensemble repose-pieds	1
2	KIW 01	Ensemble support tablette	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

KIW 01	Ensemble support tablette
KIW 03	Fixation repose-pieds (la paire) réglables en hauteur 210mm et profondeur 155mm
KIW 03 B	Fixation repose-pieds (la paire) réglables en hauteur 350mm et profondeur 270mm
KIW 03 C	Ensemble segments jambiers avec réglage d'inclinaison par noix de serrage
KIW 05	Repose-pieds central angulaire
TB001	Tablette largeur 560mm et profondeur 500mm
TB002	Tablette largeur 680mm et profondeur 600mm
ABDU1	Fixation pour plot d'abduction
ABDU2	Fixation aimantée pour plot d'abduction
ST SIEGE	Support tablette pour siège (fixation plateau)


CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.

MONTAGE/ RÉGLAGES

⚠ Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU GUIDON ET PLIAGE DE L'APPAREIL

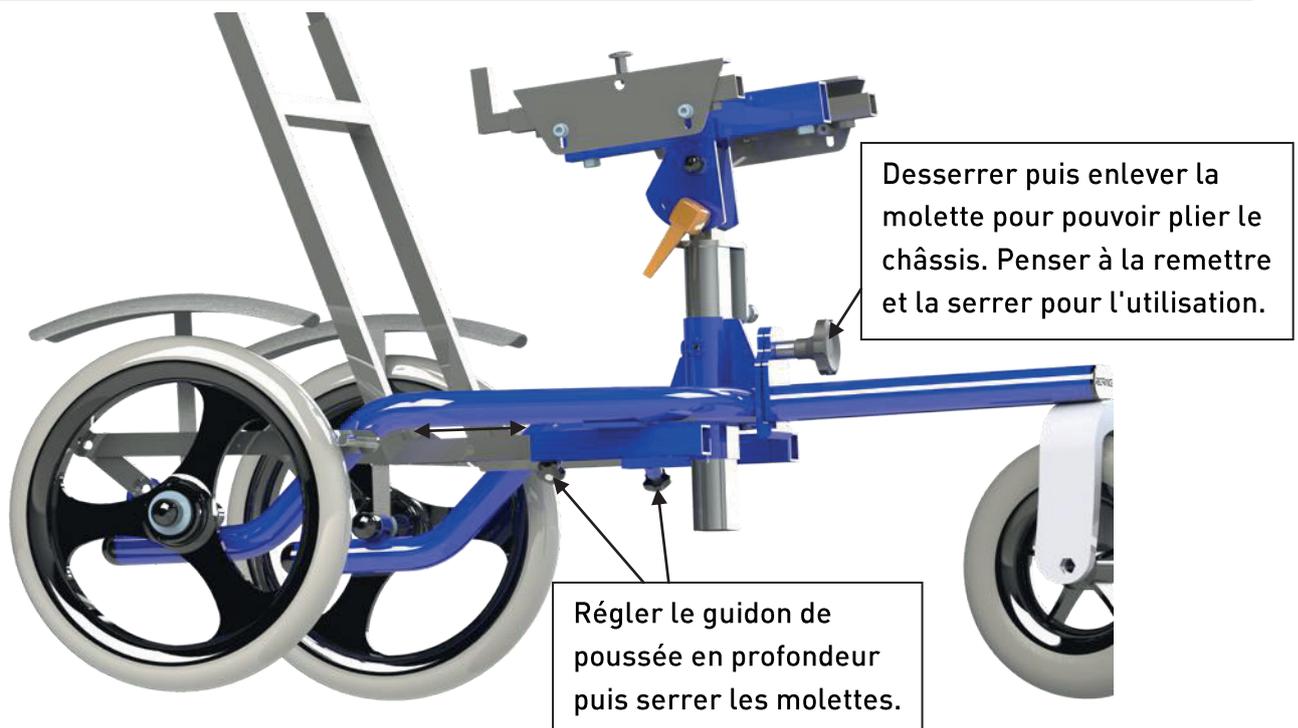

FREIN DE PARKING

⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.




Actionner le frein à pied en appuyant sur la pièce pliée; cela aura pour effet de bloquer la roue. Penser à bloquer les 2 roues arrière en position parking. Remonter la pièce pliée pour débloquer les roues.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ASSISE



Régler la hauteur de l'assise puis serrer les vis sans tête.


BRIDAGE DU PLATEAU

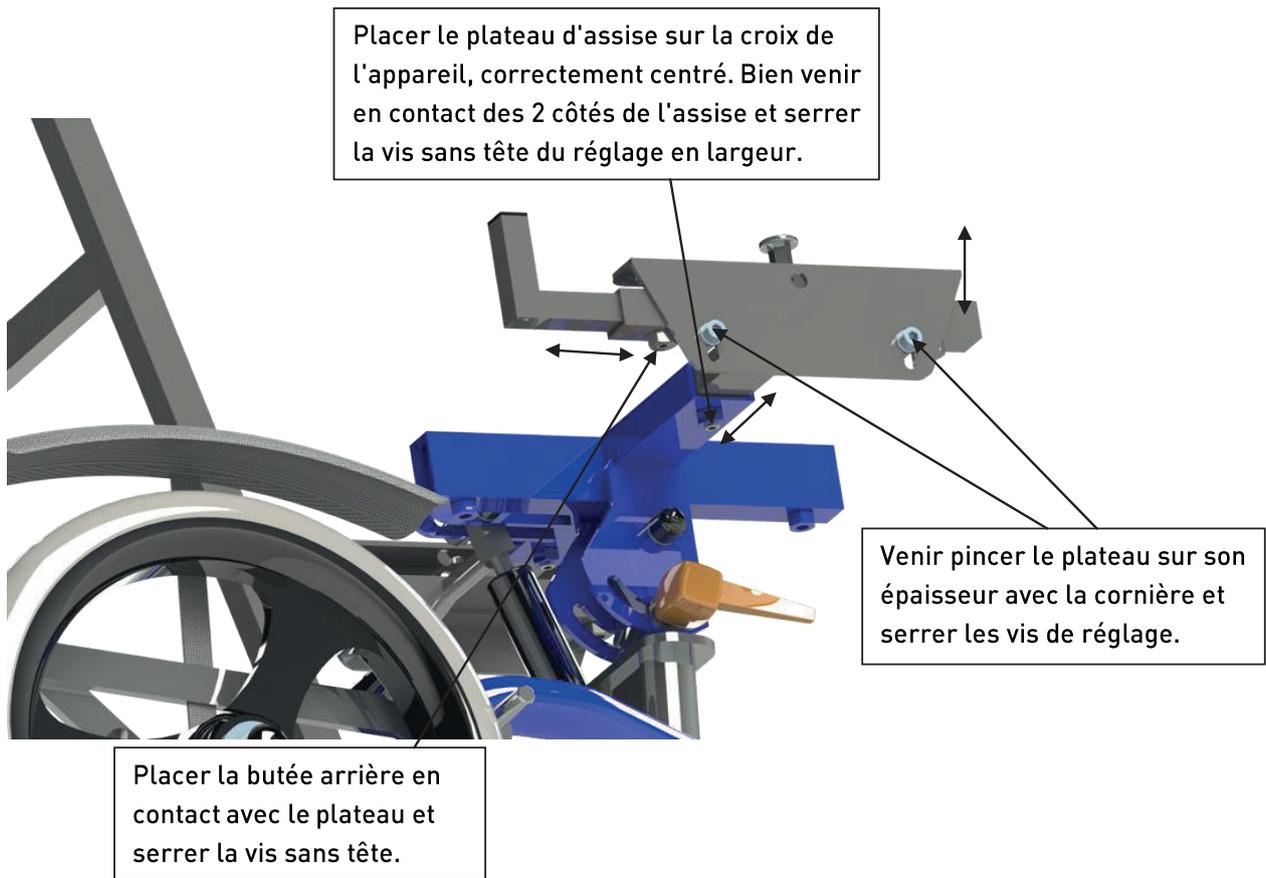

INDEXAGE DU PLATEAU



INCLINAISON DE L'ASSISE

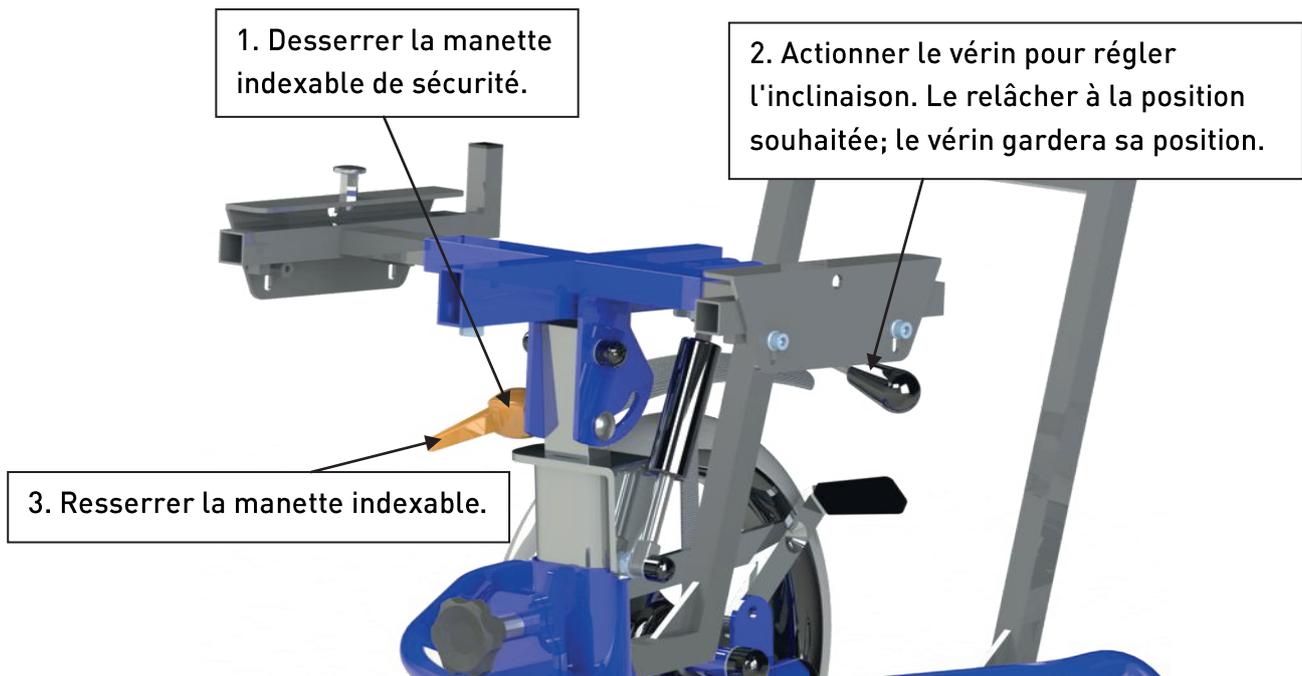


⚠ Attention : Le vérin est une aide à l'inclinaison. Sa force de poussée est fixe et les efforts à fournir par la personne manipulant le vérin peuvent varier en fonction du poids du patient.

GUIDON DE POUSSÉE




ADJONCTIONS

SUPPORT TABLETTE

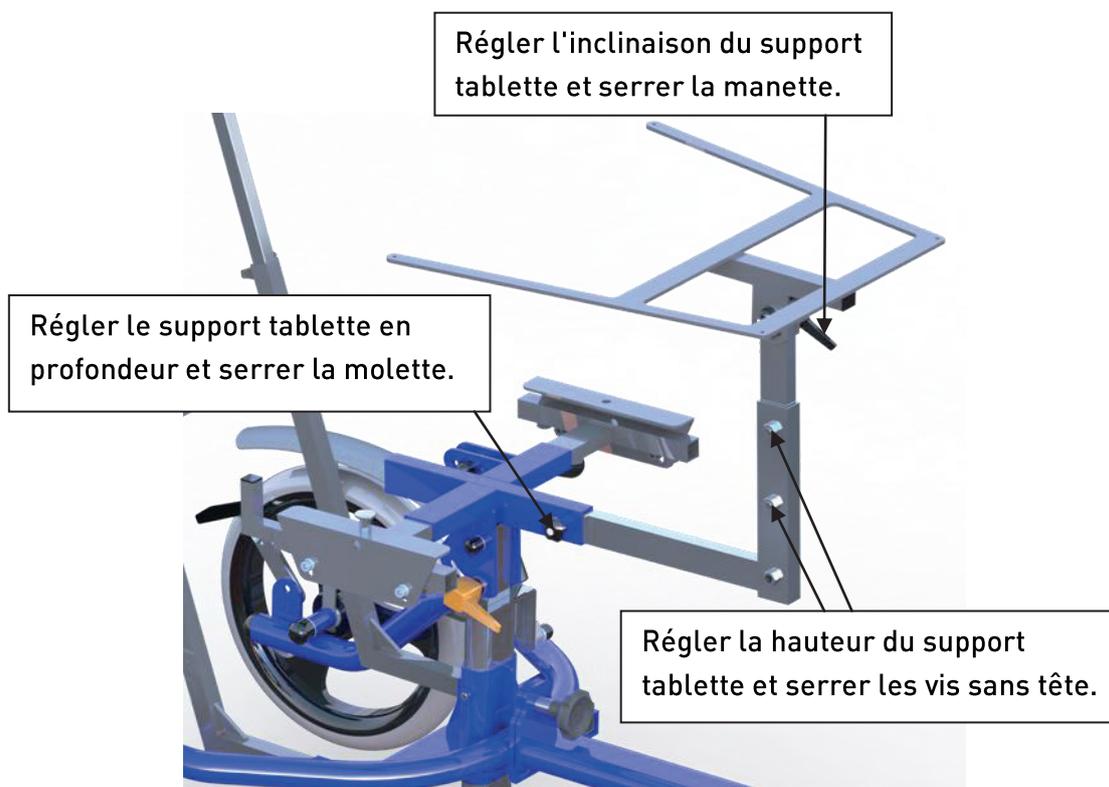

REPOSE-PIEDS

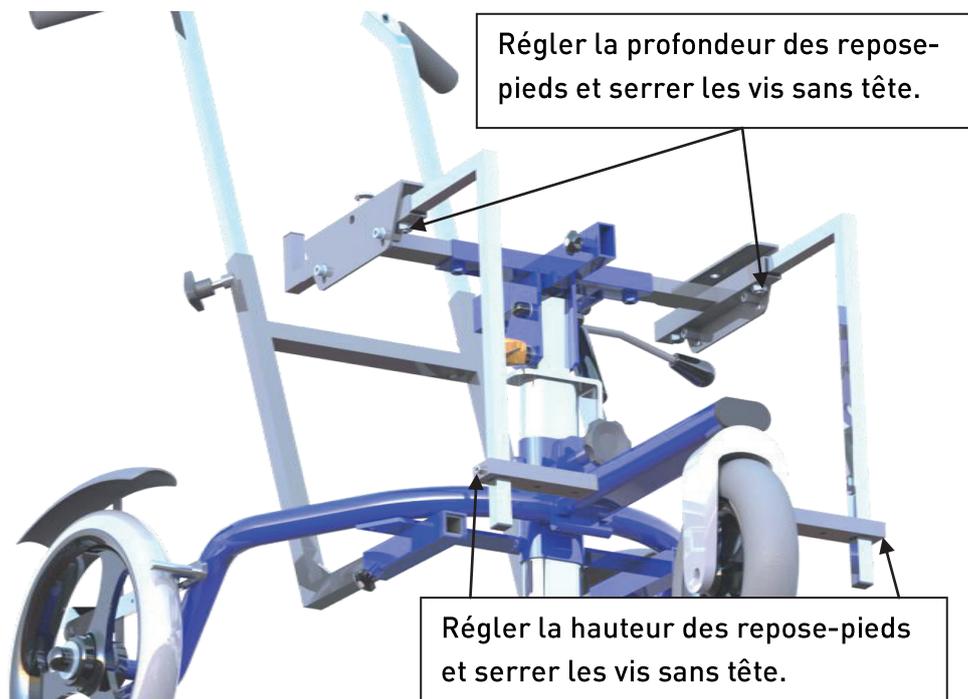

ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont - 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 - Fax : 04 67 95 06 94 - Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Kiwi_071022-V4*

N° de lot : Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement





RECFRANCE
Innovater pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

