



RECFRANCE
Innové pour Libérer

NOTICE D'UTILISATION

AIDE À LA MARCHÉ



MODULY



SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016



SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.6-8
Adjonctions	p.9
Entretien / stockage /mise au rebut	p.10
Garantie	p.10
Identification	p.10
Mentions légales	p.11



Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.** La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Moduly est un appareil modulaire de verticalisation pour enfants. Cet appareil permet de retrouver une marche en adoptant une posture droite. En effet, l'enfant est soutenu au niveau du tronc et à l'entre-jambe par des mousses. Le Moduly possède de nombreux réglages qui permettent d'ajuster le cadre à toutes les morphologies. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Le Moduly est prévu pour une utilisation en intérieur.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Moduly doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol lisse et plat. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants. Éviter les terrains en pente. Adapter le type de terrain de déambulation aux capacités de la personne déambulant; ce choix reste à l'appréciation de l'accompagnant.
- Les roulettes de l'appareil sont munies de frein; les utiliser dans les cas suivants: avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation du professionnel de santé ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante de d'aide à la marche disponible en 2 versions (fixation antérieure / fixation postérieure), 2 tailles et plusieurs coloris.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	Largeur	Longueur	Hauteur sol / entrejambe	Poids max.
T1	540 mm	750 mm	270 mm - 410 mm	25 kg
T2	600 mm	850 mm	270 mm - 560 mm	35 kg



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

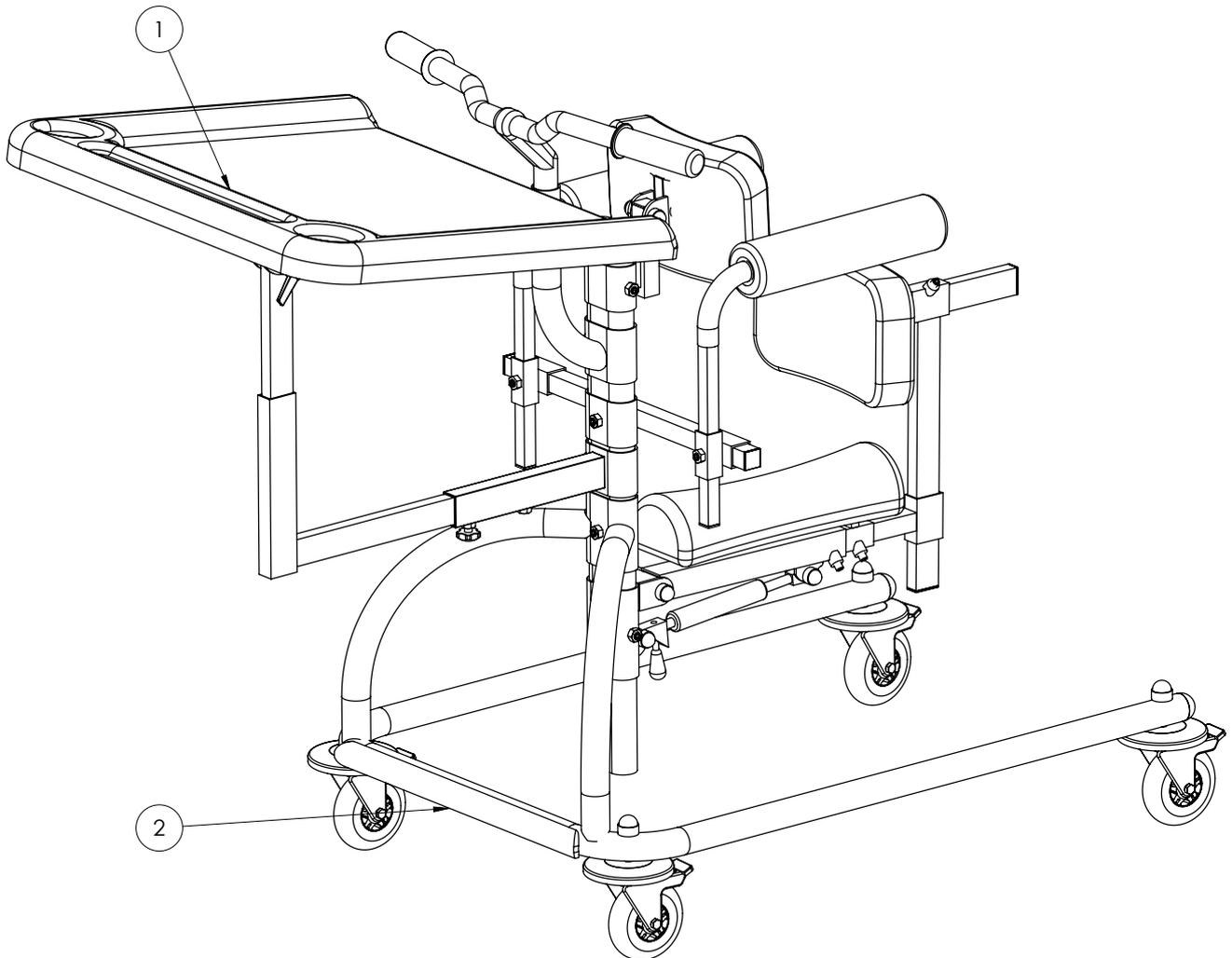

N° article	Référence	Description	Qté
1	MOD 01A	Ensemble support tablette et tablette	1
2	MOD 05	Pare-chocs avant châssis	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

MOD 01A	Ensemble support tablette et tablette largeur 560mm profondeur 500mm
MOD 01B	Ensemble support tablette et tablette largeur 680mm profondeur 600mm
MOD 03	Mousse thoracique <i>sur mesure</i>
MOD 04	Mousse dossier <i>sur mesure</i>
MOD 05	Pare-chocs avant châssis
PROTECT GM X2	Protection de roue grand modèle, la paire
PROTECT GM X4	Protection de roue grand modèle, les 4
RR UNi X2	Roues roller unidirectionnelles, la paire, à l'arrière

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.




MONTAGE/ RÉGLAGES

⚠ Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.

UTILISATION DES FREINS INTÉGRÉS AUX ROULETTES

⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.


Appui sur la languette de la roulette pour actionner le frein (verrouillage en rotation de la roue et de la chape)

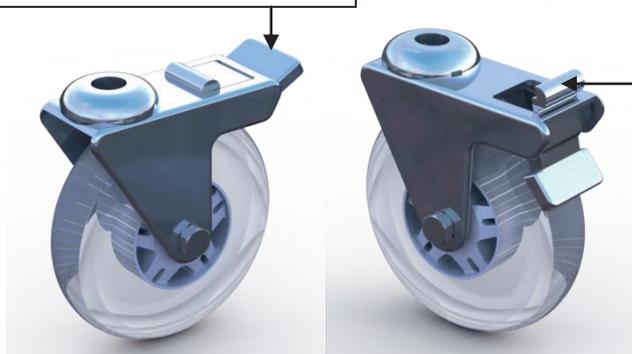

Appui sur la partie arrière de la languette pour déverrouiller le frein


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'ASSISE

Régler le mât central en hauteur et serrer la vis sans tête.

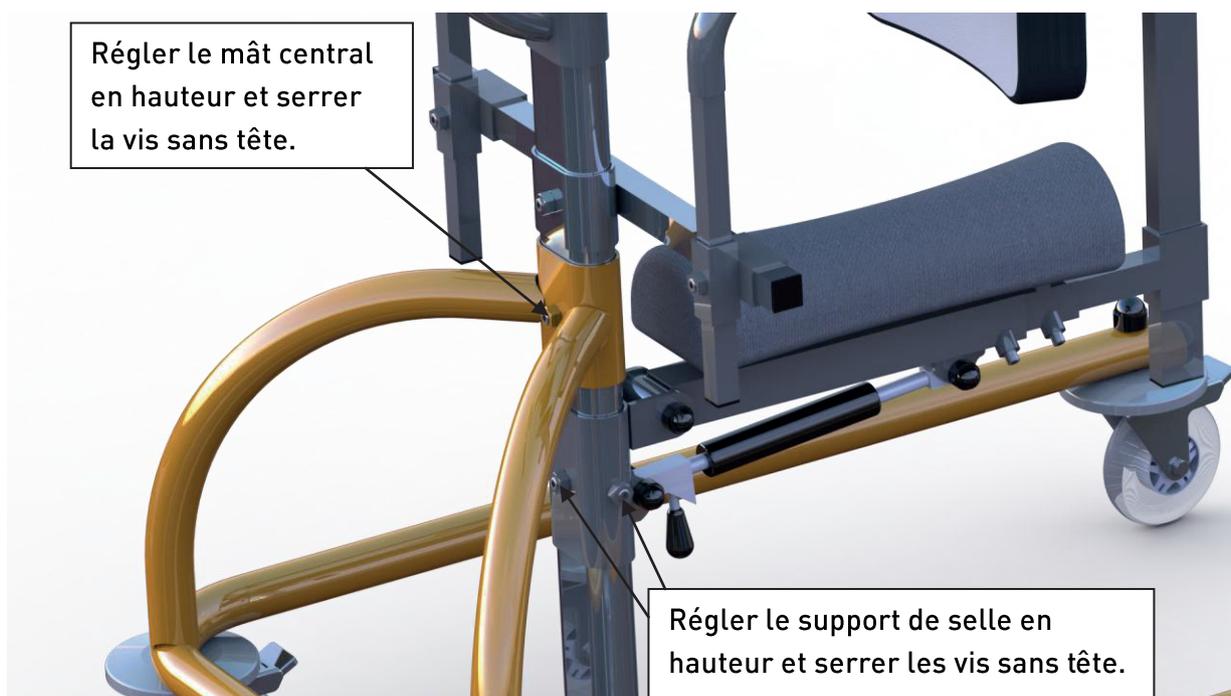


Régler le support de selle en hauteur et serrer les vis sans tête.


RÉGLAGE DE LA SELLE

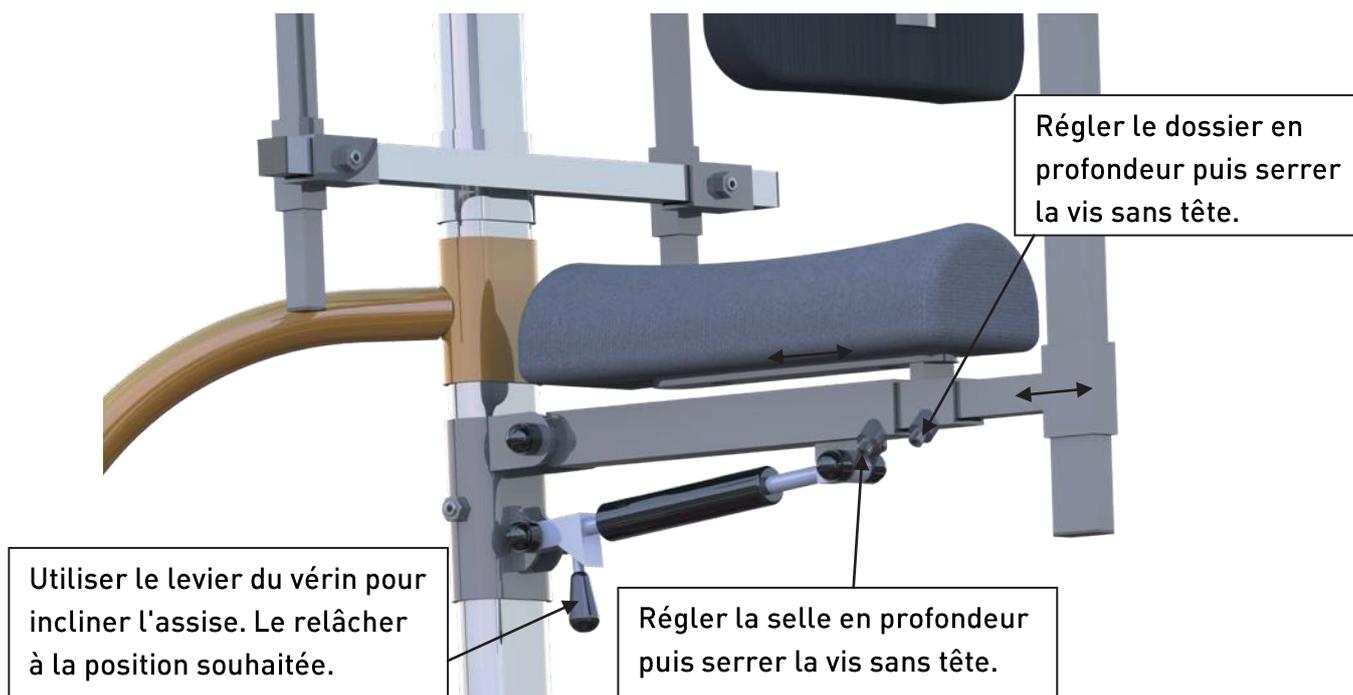


RÉGLAGE DU DOSSIER

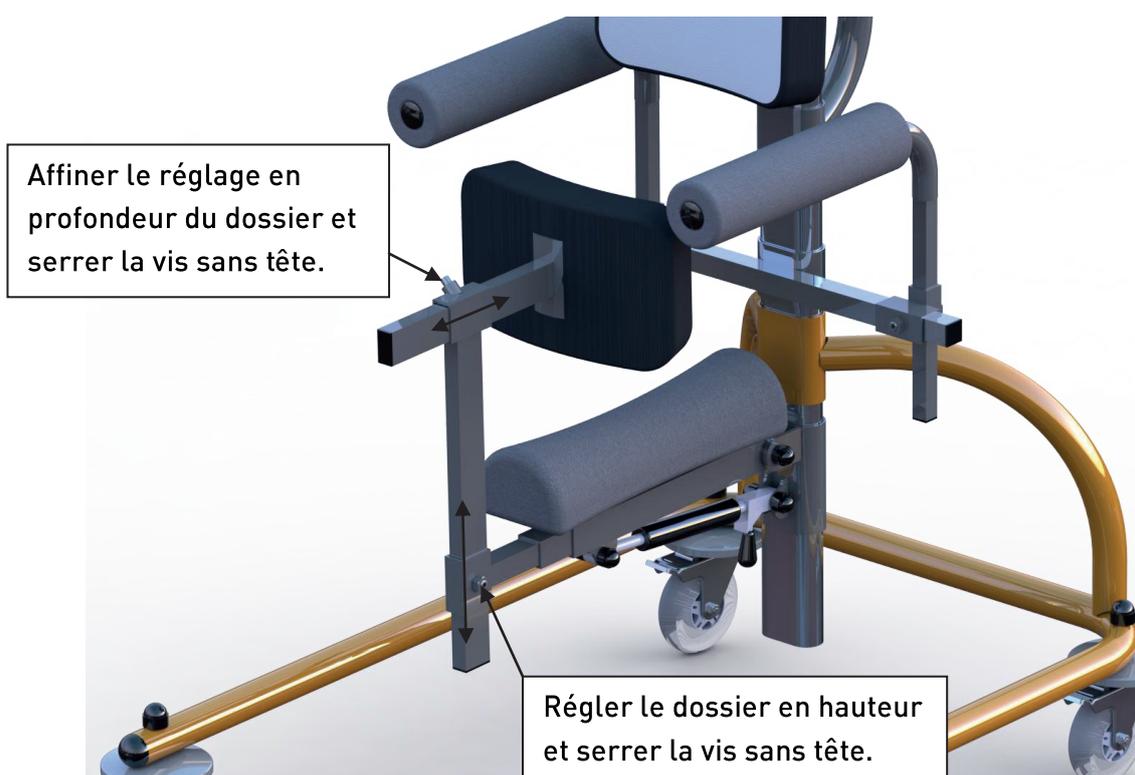

APPUIS SOUS-AXILLAIRES (HAUTEUR)

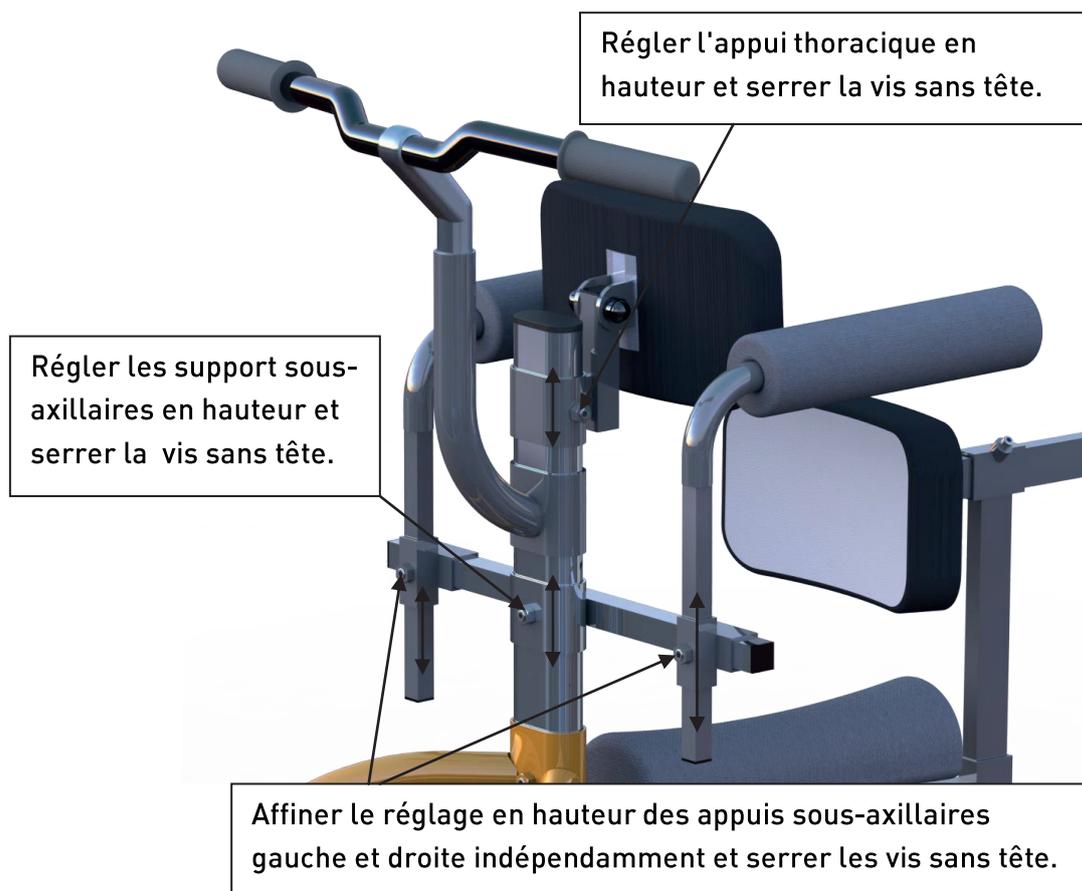



APPUIS SOUS-AXILLAIRES (LARGEUR) ET GUIDON

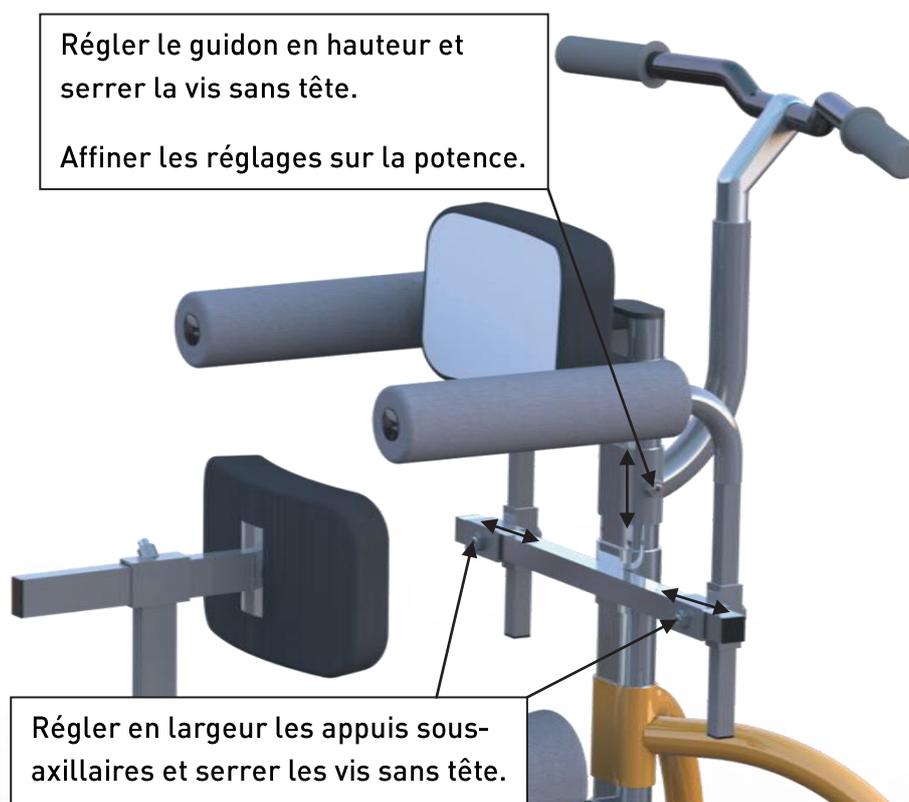

ADJONCTIONS

TABLETTE ET SUPPORT TABLETTE

Utiliser les 4 trous présents sur le support tablette pour fixer la tablette.

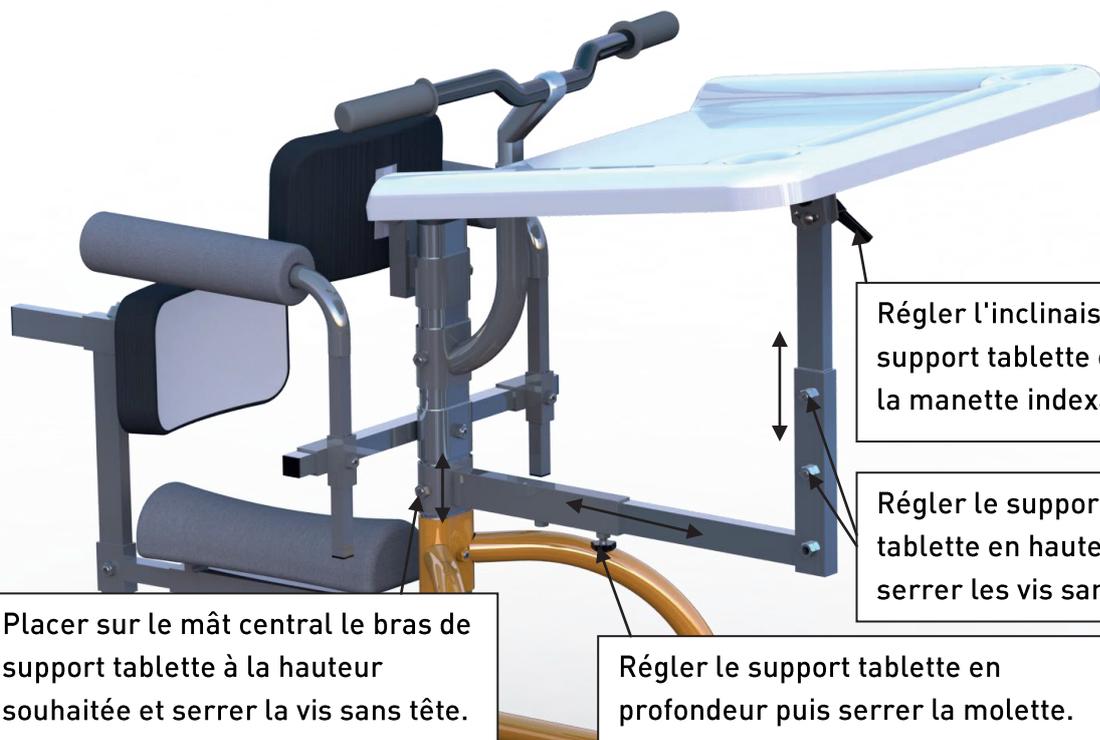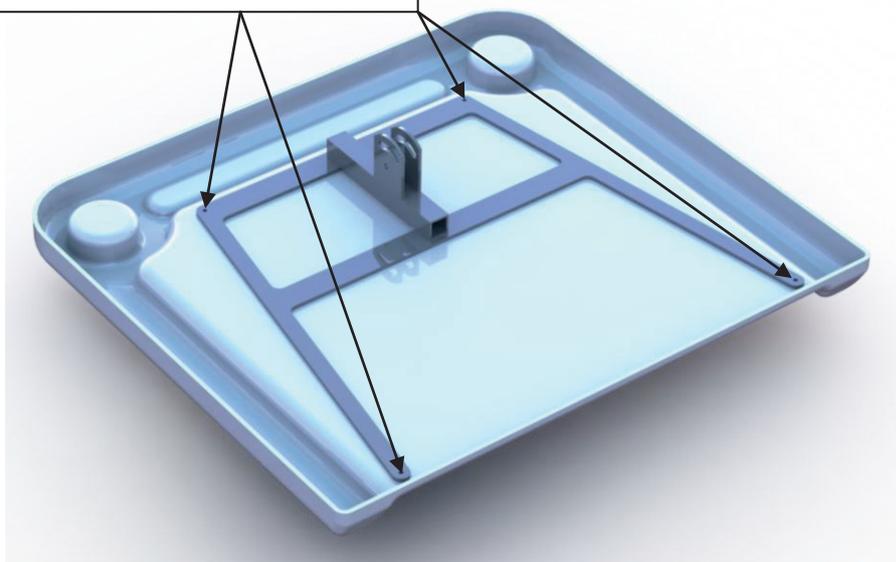

Placer sur le mât central le bras de support tablette à la hauteur souhaitée et serrer la vis sans tête.

Régler le support tablette en profondeur puis serrer la molette.

Régler l'inclinaison du support tablette et serrer la manette indexable.

Régler le support tablette en hauteur et serrer les vis sans tête.



ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont – 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 – Fax : 04 67 95 06 94 – Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : NU_Moduly_071022-V3

N° de lot :

Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement





RECFRANCE
Innovater pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

