

NOTICE D'UTILISATION

SUPPORT SIÈGE







SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi	
mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.4-5
Montage/ réglages	p.6-9
Adjonctions	p.10-12
Entretien / stockage /mise au rebut	p.13
Garantie	p.13
Identification	p.14
Mentions légales	p.14



Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.**La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

Vérifier que l'ensemble des roues, molettes, vis et écrous sont bien serrés.

Vérifier que les freins et dispositifs anti-bascule fonctionnent correctement.

UTILISATION PRÉVUE

Le Tygrys a été développé dans le but d'y adapter un corset-siège. Ses différents réglages permettent de s'ajuster au corset-siège. Il est proposé en 2 versions: avec grandes roues pour un déplacement en autonomie, ou petites roues pour une propulsion par tierce personne. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier.

RESTRICTIONS D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Tygrys doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est concu pour une utilisation en intérieur et en extérieur, sur des terrains non accidentés. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants.
- Le châssis est muni de freins de parking sur ses roues arrières; penser à les actionner avant un transfert, avant d'actionner le vérin pour monter et/ou incliner le socle, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- Transfert: toujours mettre le frein avant de s'installer dans l'appareil ou en sortir; ne jamais prendre appui sur les repose-pieds pour s'installer dans l'appareil ou en sortir, ni sur les accoudoirs.
- Risque de basculement:
 - Le changement d'inclinaison d'assise et/ou du dossier accroît le risque de basculement.
 - Les dispositifs anti-bascule doivent toujours être présents sur l'appareil.
 - Ne pas se pencher en avant.
 - Ne rien suspendre sur la barre de dossier, sous peine de modifier le centre de gravité de l'appareil.
- Le risque de se coincer certaines parties du corps est toujours accru lors de l'inclinaison de l'assise et du dossier.
- Transport: Soulever l'appareil par son châssis. En particulier, ne pas le soulever par les accoudoirs ou les repose-pieds.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.




Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante support de siège. Amplitude d'inclinaison: 25° bascule d'assise, 30° dossier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Largeur	Longueur	Hauteur d'assise	Diamètre roues arrière	Poids max. utilisateur
Tygrys T1 PR	690mm	800mm	390 à 470mm	300mm	100kg
Tygrys T1 GR	690/740mm			600mm	
Tygrys T2 GR	740/790mm				600mm

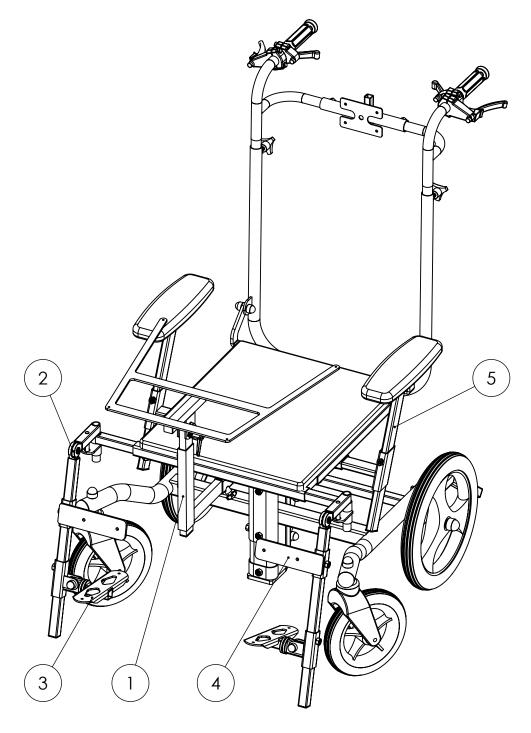

N° article	Référence	Description	Qté
1	TYG 01	Ensemble support tablette	1
2	TYG 02	Potences escamotables	1
3	TYG 03	Repose-pieds avec réglage angulaire	1
4	TYG 04	Repose jambes	1
5	TYG 05	Accoudoirs	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

TYG 01	Ensemble support tablette
TYG 02	Potences escamotables (la paire)
TYG 03	Repose-pieds avec réglage angulaire (la paire)
TYG 04	Repose jambes (la paire)
TYG 05 A	Accoudoirs confort (la paire)
TYG 05 B	Accoudoirs gouttière (la paire)

MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

Les embouts de tube, cache-écrous sont en polyéthylène (PE).

La visserie est en acier zingué, les molettes en technopolymères. Les poignées sont en PVC.

Les roues sont en polyuréthane (PU), ainsi que les accoudoirs.

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **vérins** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.



MONTAGE/ RÉGLAGES





⚠ Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.

INSTALLATION DU SUPPORT SIÈGE: FIXATION DE L'ASSISE



FIXATION ET RÉGLAGE DU DOSSIER

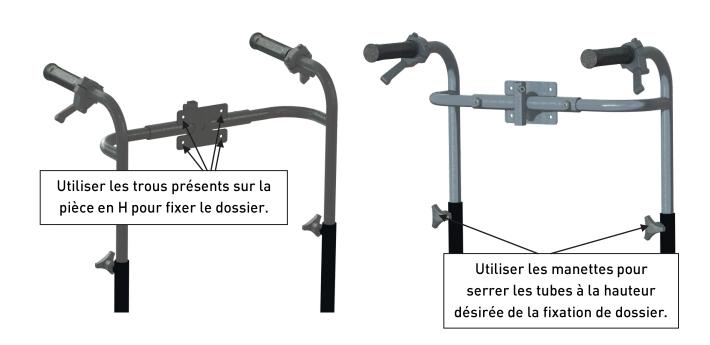

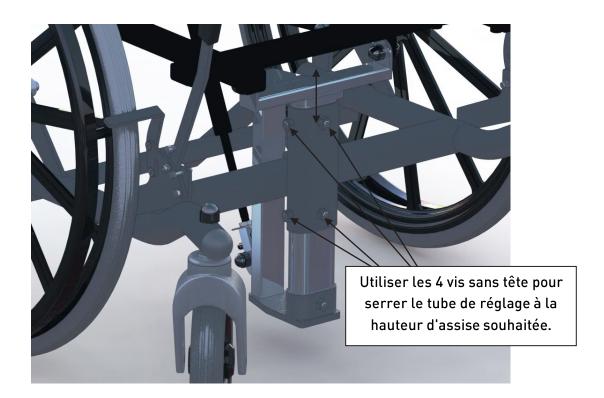


RÉGLAGE DE LA LARGEUR DES ROUES (VERSION «GRANDES ROUES»)

Les différentes possibilités de positionnement des entretoises sur les axes des roues permettent un réglage de l'écartement des roues.

Positionnement


intermédiaire

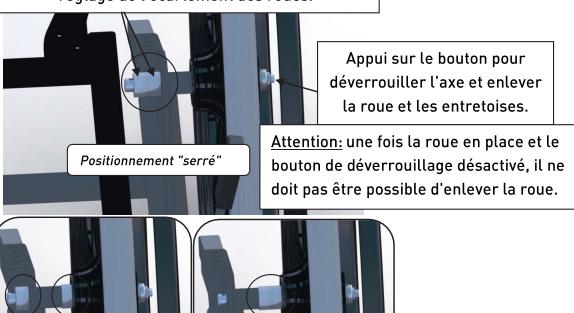

Positionnement "écarté"


Attention : Risque de coincement des doigts entre le patin de frein et la roue arrière: garder les doigts éloignés des pièces mobiles.

Les freins de parking sont utilisés pour immobiliser l'appareil lorsqu'il est à l'arrêt: ne pas les enclencher lorsque l'appareil est en mouvement.

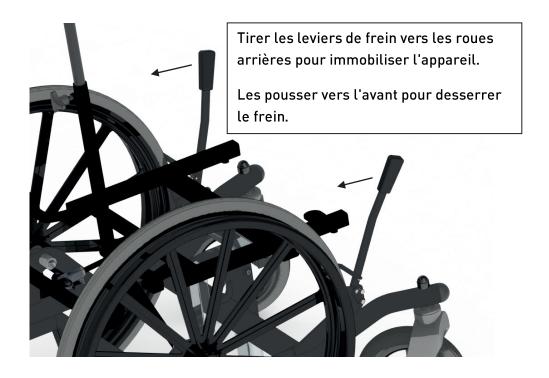


INCLINAISONS DE LA BASCULE ET DU DOSSIER (VERSION «GRANDES ROUES»)

Attention: Pour régler en angle la bascule et/ou le dossier, immobiliser l'appareil avec les freins de parking avant toute manipulation. Attention également au risque de coincement des doigts: les éloigner des pièces en mouvement, en particulier entre les accoudoirs et les roues.

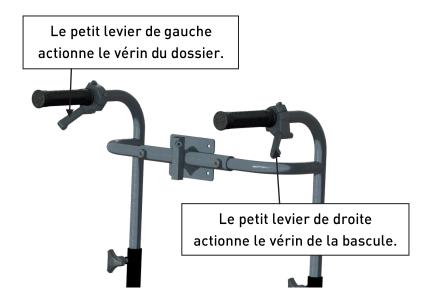

Attention : Pour régler en angle la bascule et/ou le dossier, immobiliser l'appareil avec les freins de parking avant toute manipulation. Attention également au risque de coincement des doigts: les éloigner des pièces en mouvement, en particulier entre les accoudoirs et les roues.

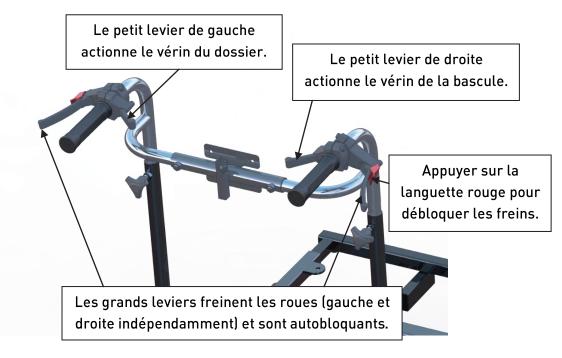

🔼 Attention : Les freins de parking sont utilisés pour immobiliser l'appareil lorsqu'il est à l'arrêt: ne pas les enclencher lorsque l'appareil est en mouvement.

ANTIBASCULE


Attention : Risque de basculement du patient s'il est positionné trop en arrière ou qu'il se penche en arrière. Ajuster correctement les tubes antibascule. Ne jamais les retirer de l'appareil.

> Appuyer sur le bouton à ressort pour déverrouiller la position. Faire coulisser le tube intérieur jusqu'à la position désirée. Vérifier le bon verrouillage du bouton.







SUPPORT TABLETTE

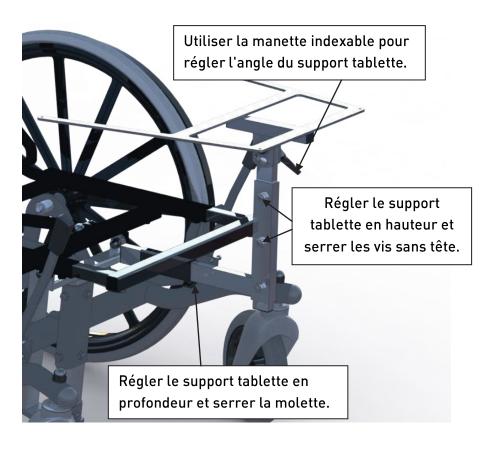


ACCOUDOIRS

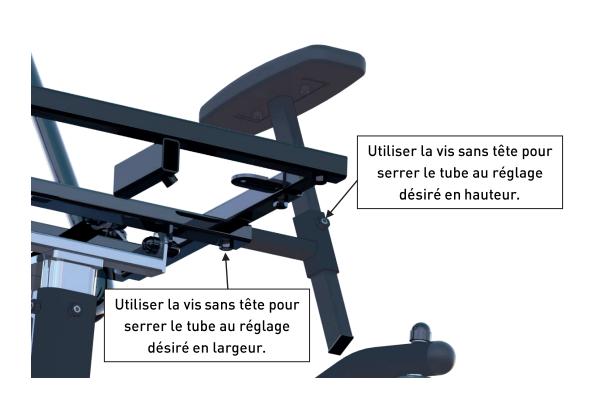

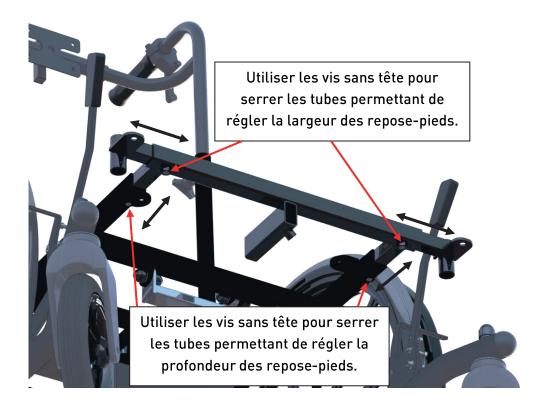


REPOSE-PIEDS: SEGMENT JAMBIER ET ESCAMOTAGE

Pour escamoter l'ensemble repose pied, soulever légèrement l'ensemble pour le désindexer du support (1), puis tourner sur le côté (2).

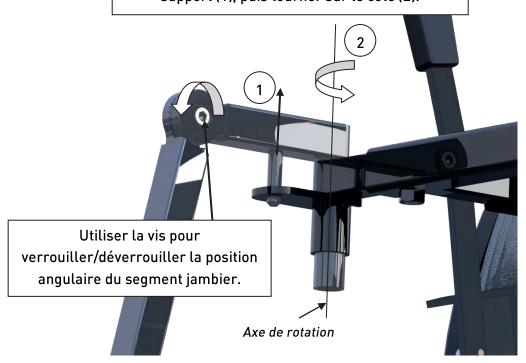

Utiliser les vis sans tête pour serrer les tubes de réglage des repose-jambe et repose-pied à la hauteur souhaitée.

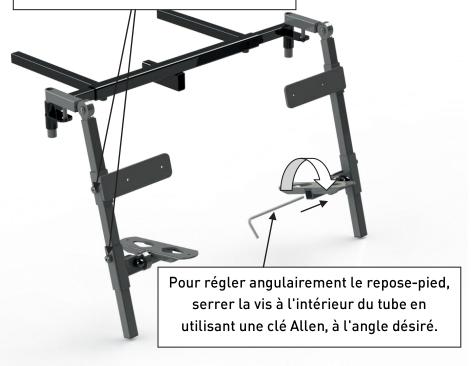

ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité. Ne pas laisser l'appareil au soleil. Ne pas stocker à l'extérieur.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrippant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.



IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont - 34600 Bédarieux Tél: 04 67 95 04 50 - Fax: 04 67 95 06 94 - Mail: administration@recfrance.com Web: www.recfrance.com SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document · NII Tyarys 071022-V3

ment: NO_1yg1y3_071022 V3				
Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement				

MENTIONS LÉGALES



La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.

Visuels non contractuels.

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT: / /	
CACHET DU REVENDEUR :	
CE	

NOTES		
-		





136 ancienne route de Clermont 34600 Bédarieux

Tél.: 04.67.95.04.50 Fax: 04.67.95.06.94

