

NOTICE D'UTILISATION

APPAREIL MODULAIRE




VERTI-UP



SOMMAIRE

Vérifications avant utilisation	p.3
Utilisation prévue	p.3
Restriction d'utilisation / précautions d'emploi mises en garde spéciales	p.3
Description produit	p.3-5
Montage/ réglages	p.5-8
Adjonctions	p.9
Entretien / stockage /mise au rebut	p.9
Garantie	p.10
Identification	p.10
Mentions légales	p.10

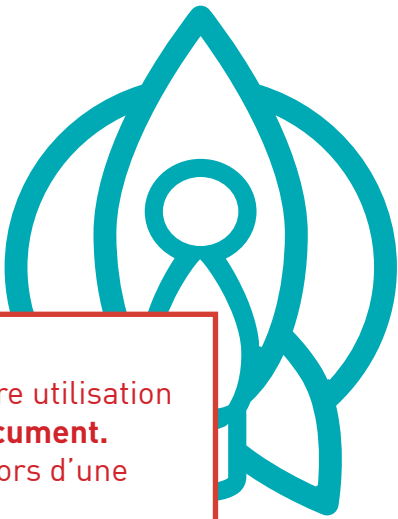

Merci de lire attentivement cette notice avant la première utilisation de votre appareil. **Conservez soigneusement ce document.**
La notice d'utilisation est à remettre avec le produit lors d'une éventuelle cession à des tiers.

Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant ce support, contactez votre applicateur/prescripteur.

VÉRIFICATIONS AVANT UTILISATION

Avant le montage de votre châssis, merci de vérifier que le colis contient bien tous les éléments listés en pièces détachées, ainsi que les éléments d'options définies lors de votre commande.

Avant la première utilisation de votre châssis, merci de vérifier que le montage a été effectué conformément à la notice.

UTILISATION PRÉVUE

Le Verti-Up est un appareil modulaire équipé de mousses pour maintenir le patient en position debout. Les soutiens se situent au niveau abdominal, lombaires et sous-rotuliens. Il possède des barres d'appui à hauteur du patient pour faciliter son installation. Ce système est utilisé en rééducation et dispose de 4 roues rollers permettant ainsi les déplacements. L'équipement complet est destiné à un patient en particulier pour un handicap particulier. Le Verti-Up est prévu pour une utilisation en intérieur exclusivement.

RESTRICTION D'UTILISATION / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Le châssis Verti-Up doit être utilisé dans les limites de poids et de taille conseillées.
- Ce châssis est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol lisse et plat. Ne pas rouler sur des clous, des pointes ou des objets tranchants. Eviter les terrains en pente.
- Les roulettes de l'appareil sont munies de frein; les utiliser dans les cas suivants: avant un transfert, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.
- La maintenance du produit reste à l'appréciation du professionnel ayant procédé à son installation.
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié. Des réglages inadéquats peuvent causer des blessures et / ou dommages à l'utilisateur, à la personne aidante, et à ce support.
- Ne pas installer d'accessoires non autorisés et non approuvés par RECFRANCE.
- En cas de dysfonctionnement / dommage / détérioration constaté(s) sur l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser et contacter le fabricant.

 **Ne pas laisser le patient utiliser son support roulant sans surveillance.**

DESCRIPTION PRODUIT

Base roulante modulaire de verticalisation disponible en plusieurs coloris.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	Longueur	Distance appui abdominal / appui lombaire	Poids max.
660mm	9000 mm	170mm - 400mm	120 kg



MATÉRIAUX UTILISÉS

Le châssis de base et chacun des éléments sont fabriqués en acier, et bénéficient soit d'un traitement de zingage, soit d'un thermolaquage avec peinture à base de mélange de résines synthétiques et pigments.

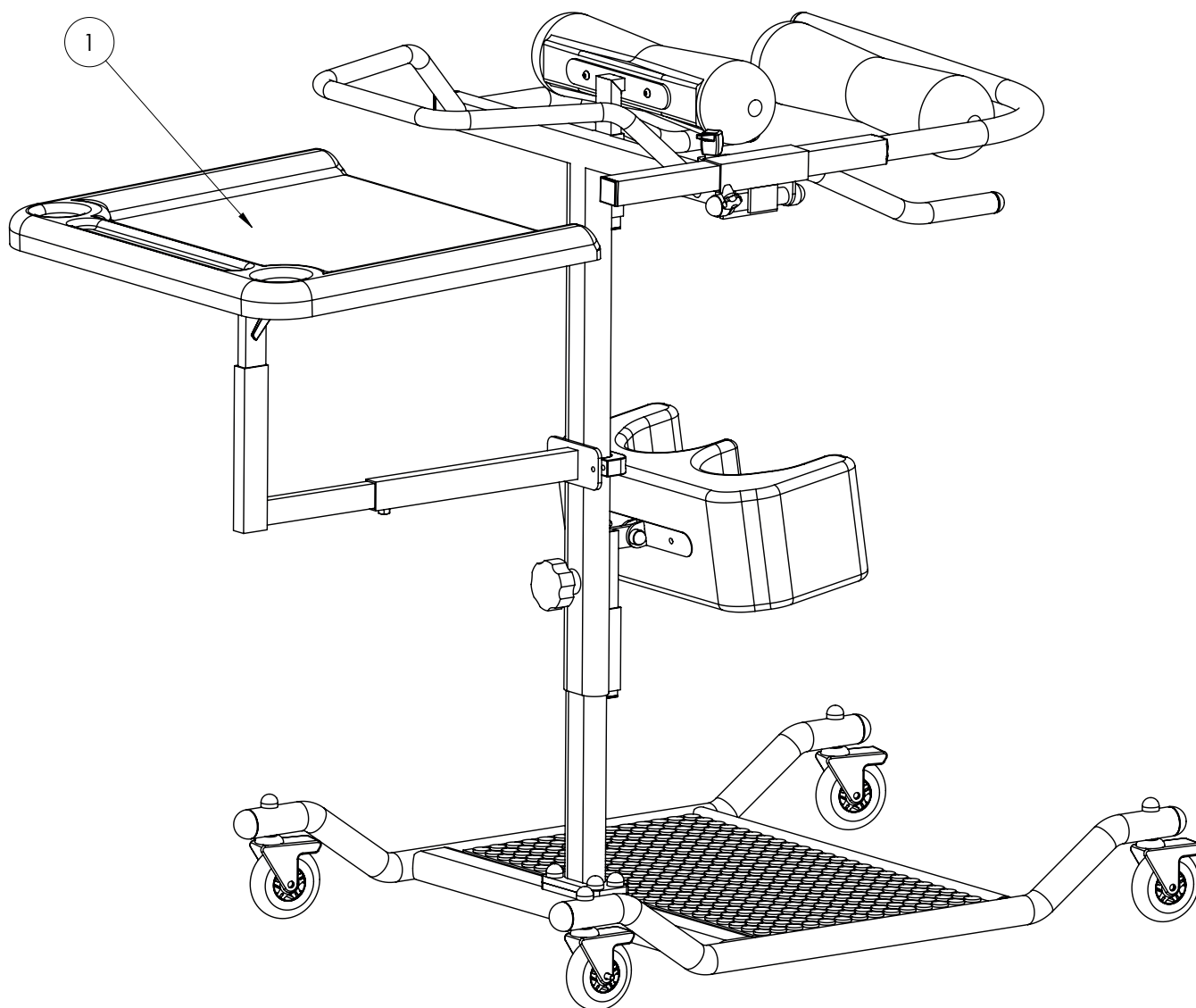

N° article	Référence	Description	Qté
1	VUTB 001	Ensemble support tablette avec tablette	1

COMPATIBILITÉ

Cette base roulante peut être équipée avec les accessoires suivants :

VUTB 001	Ensemble support tablette et tablette largeur 560mm profondeur 500mm
VUTB 002	Ensemble support tablette et tablette largeur 680mm profondeur 600mm
PROTECT	Protection de roue
PROTECT GM	Protection de roue grand modèle

CONSOMMABLES

Les **roues** ainsi que les **appuis en mousse** sont des composants susceptibles de s'user; au cours du cycle de vie de votre appareil, il est possible d'avoir à changer ces composants. Pour commander de nouvelles pièces et savoir comment les remplacer, contacter le fournisseur.


MONTAGE/ RÉGLAGES

⚠ Les réglages doivent impérativement être effectués par un personnel qualifié.


UTILISATION DES FREINS INTÉGRÉS AUX ROULETTES

⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins avant un transfert, avant tout réglage ou toute manipulation en général, ainsi que pour immobiliser l'appareil en cas de stockage et/ou stationnement.

Appui sur la languette de la roulette pour actionner le frein (verrouillage en rotation de la roue et de la chape)

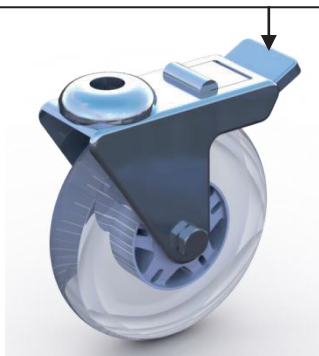

Appui sur la partie arrière de la languette pour déverrouiller le frein

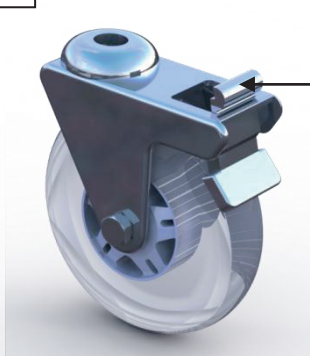


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Régler le mât en hauteur en fonction de la taille de l'utilisateur et serrer la molette.



RÉGLAGE DES APPUIS SOUS-ROTULIENS

Affiner en hauteur le réglage des appuis sous-rotuliens et serrer les vis sans tête.

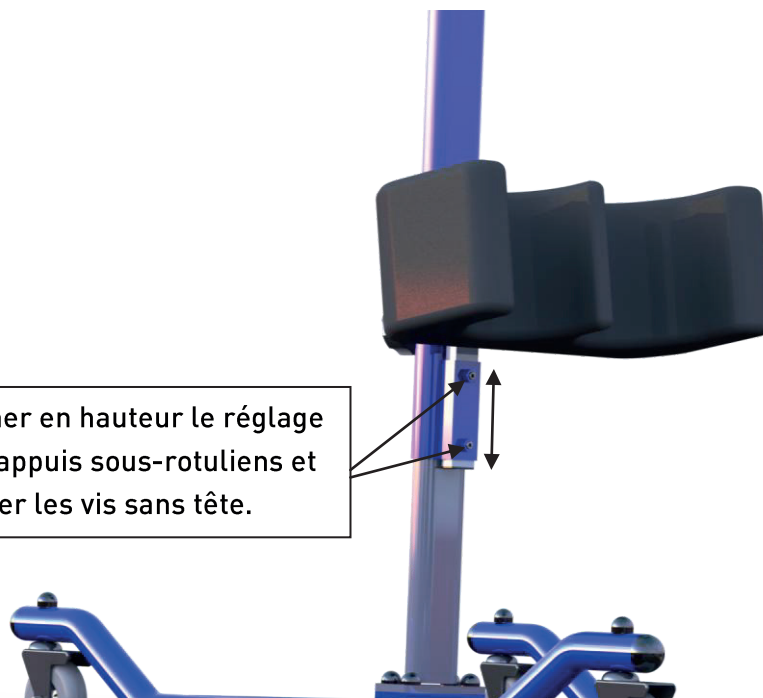


RÉGLAGE DE L'APPUI ABDOMINAL




RÉGLAGE APPUI LOMBAIRE

Utiliser la pièce de sécurité pour empêcher l'ouverture du bras de dossier et serrer la manette indexable.

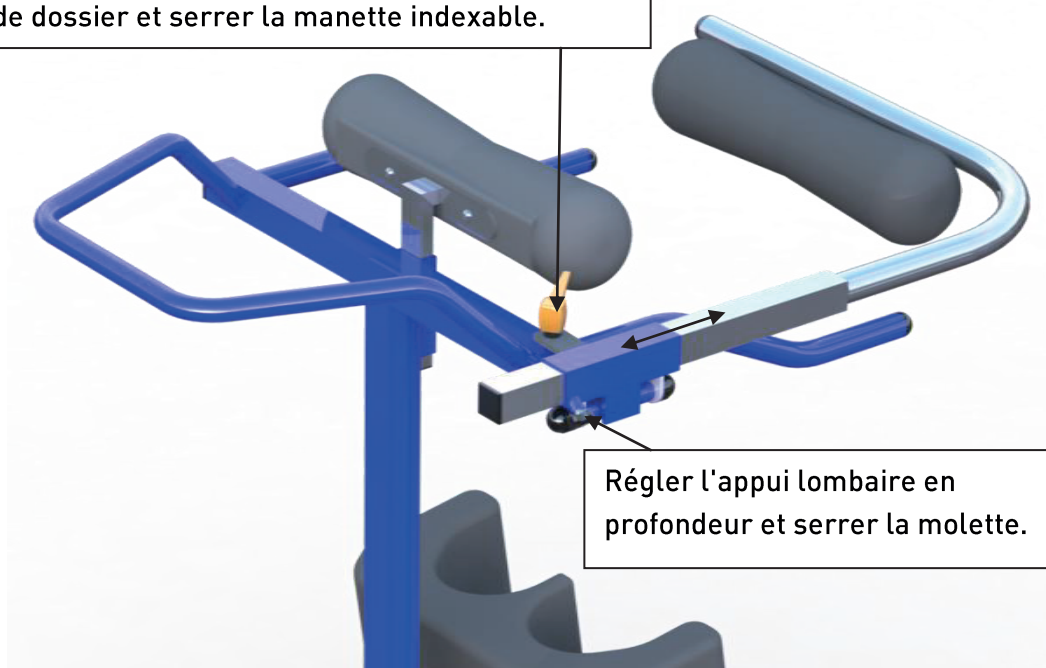

Le bras s'ouvre pour que le patient accède facilement à l'appareil. Il se referme pour sécuriser la station debout. Penser à utiliser la manette indexable et à faire tourner la pièce de sécurité pour verrouiller / déverrouiller le bras.

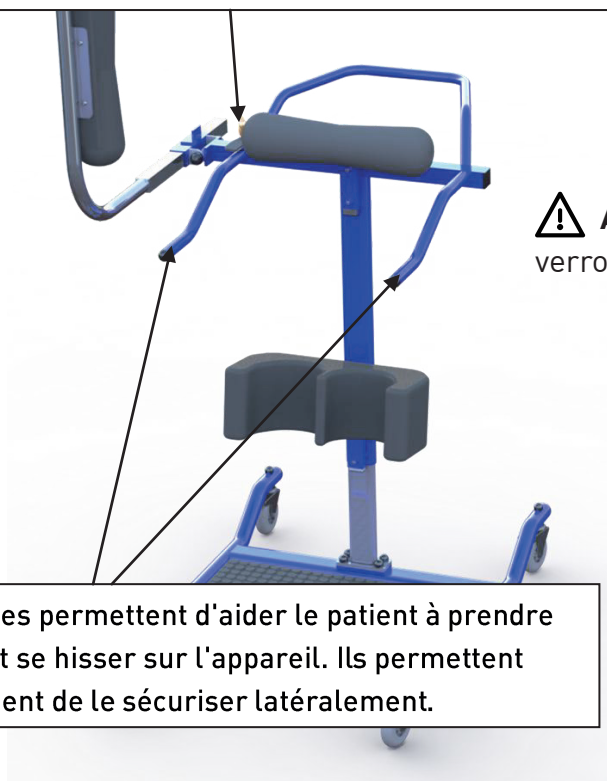


⚠ Attention : Penser à verrouiller les freins des roulettes

Les tubes permettent d'aider le patient à prendre appui et se hisser sur l'appareil. Ils permettent également de le sécuriser latéralement.

ADJONCTIONS

TABLETTE ET SUPPORT TABLETTE

Utiliser les 4 trous présents sur le support tablette pour fixer la tablette.

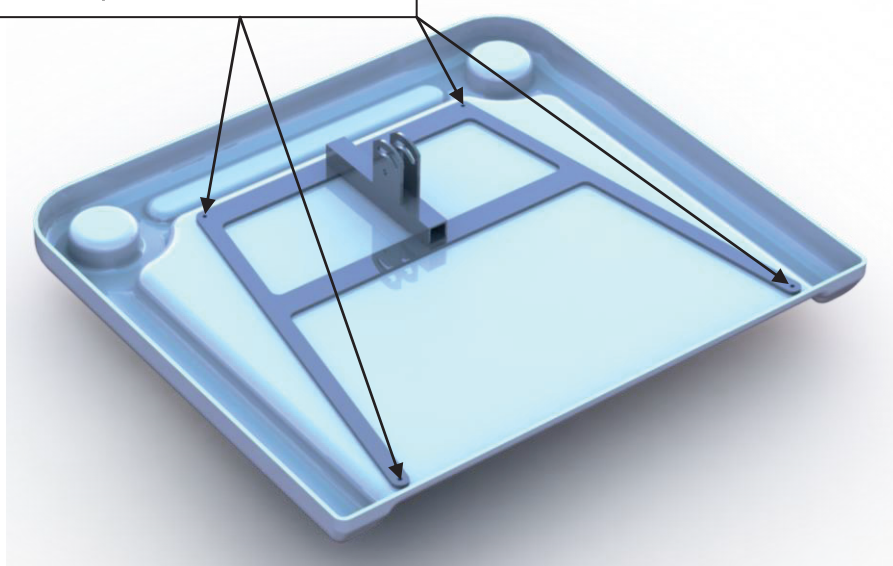

Régler l'inclinaison du support tablette et serrer la manette indexable.

Régler le support tablette en hauteur et serrer les vis.

Affiner la réglage en hauteur et serrer les vis sans tête.

Régler la profondeur et serrer la molette.



ENTRETIEN / STOCKAGE / MISE AU REBUT

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité.
- La maintenance du châssis doit impérativement être effectuée par un personnel qualifié.
- Les visites de contrôle du châssis par un distributeur agréé doivent être annuelles à minima, et suivre toute période de non utilisation prolongée.
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcalins ou agressifs. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau chaude et de détergent non agressif. Séchez ensuite les surfaces avec un chiffon sec.
- Vérifier régulièrement le bon serrage des vis.
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des ensembles coulissants et/ou pivotant; utiliser du dégrissant ou de la graisse si besoin et adapter le couple de serrage des boulons.
- À la fin du cycle de vie de votre châssis, procédez à son recyclage de manière appropriée. L'emballage carton est à recycler. La mise au rebut est assujettie aux réglementations nationales et locales. Pour procéder à une mise au rebut correcte, renseignez vous sur les organismes locaux de traitement des déchets auprès de votre mairie.
- Pour toute commande de pièces détachées, veuillez vous adresser à votre revendeur en lui précisant le numéro de lot de votre châssis.

GARANTIE

L'ensemble de nos fabrications est garanti contre tout vice et défaut démontré de fabrication, à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation conforme aux instructions du fabricant et d'une maintenance régulière. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les conséquences d'une manipulation incorrecte, la détérioration ou le défaut d'entretien. La garantie ne couvre pas le montage ou la mise en service inappropriés par l'acheteur ou par un tiers.

Lors de toute correspondance pour une éventuelle prise en charge sous garantie, il est impératif de nous communiquer les éléments d'identification du produit (numéro de lot, facture d'achat...).

Pour en savoir plus sur nos modalités de garanties, merci de vous reporter aux conditions générales de vente.

IDENTIFICATION

Nom et adresse du fabricant :

Recfrance - 136 ancienne route de Clermont - 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 04 50 - Fax : 04 67 95 06 94 - Mail : administration@recfrance.com
Web : www.recfrance.com
SAS au capital de 141 300€ RCS Béziers 401 406 871 00020

Version document : *NU_Verti-Up_071022-V3*

N° de lot :

Coller l'étiquette numéro de lot à cet emplacement



MENTIONS LÉGALES

La conception générale, ainsi que les textes, images, savoir-faire et tout autre élément composant le produit sont la propriété exclusive de RECFRANCE et/ou de ses fournisseurs.

Visuels non contractuels.

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le patient est établi.

DATE D'ACHAT : / /

CACHET DU REVENDEUR :

NOTES



REC FRANCE
Innover pour Libérer

136 ancienne route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél. : 04.67.95.04.50
Fax : 04.67.95.06.94

